

qube**SERIE**

Quick Start Guide



SKILLQUBE®
Training



Liebe Kunden und Partner,

Willkommen bei **SKILLQUBE!**

Es freut uns sehr, dass Sie nun ein Teil des weltweiten Netzwerks von **SKILLQUBE** geworden sind.

Wir bei **SKILLQUBE** haben es uns zur Aufgabe gemacht die Simulation in der (prä-)klinischen Medizin zu revolutionieren. Mit unserer Mission **360** möchten wir mit maßgeblichem Input alle Bereiche des Lernens nachhaltig unterstützen, dabei ist der Kreislauf des Lernens das Zentrum unserer Mission.

In die Entwicklung unserer Simulationsprodukte haben wir unsere Erfahrung und unser Herzblut gesteckt mit dem Ziel Ihnen ein möglichst erfolgreiches Trainingserlebnis zu bieten.

Auch wir entwickeln uns stetig weiter und erweitern dabei unsere Produkte, damit Simulationen ein Teil Ihres Alltags werden können.

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter www.skillqube.com.

Ihr Team von **SKILLQUBE**.




Allgemeines

APPEL GERÄTE BEDIENEN

Kontrollzentrum öffnen

Zum Öffnen streichen Sie auf einem beliebigen Bildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Streichen Sie auf einem iPad mit iOS 12 oder neuer auf dem Bildschirm von oben rechts nach unten. Bei älteren Versionen streichen Sie von unten nach oben.

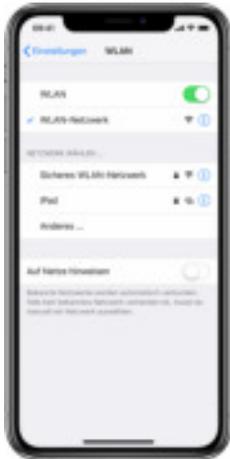

WLAN Verbindung herstellen

Bevor Sie mit der Simulation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich Controller, Monitor und Assessment im gleichen WLAN befinden.

Gehen Sie hierzu zu auf dem Home Bildschirm zu Einstellungen > WLAN und wählen das entsprechende Netzwerk aus. Wiederholen Sie dies auf allen drei Geräten.

Software Updates

Halten Sie Ihre Software immer auf dem neuesten Stand!



1.

Gerät verbinden

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG



Wenn Sie den Controller und den Monitor verbinden möchten, tippen Sie rechts oben auf den rot blinkenden „Gerät verbinden“ Button.



Durch das Tippen öffnet sich eine Ansicht mit allen verfügbaren Geräten in der Umgebung. Suchen Sie Ihren Monitor und wählen diesen aus.



Sie werden auf dem Monitor aufgefordert, den Controller mit dem Monitor zu verbinden. Sind die Geräte miteinander verbunden, wird dies durch einen Haken bestätigt.


2.

Szenario starten

FREIES SZENARIO STARTEN

Um ein freies Szenario zu starten, drücken Sie rechts unten auf Szenario starten. Bestätigen Sie, dass Sie ein Freies Szenario starten möchten.

Wenn Sie ein vorhandenes Szenario aus der qubeCLOUD laden möchten, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

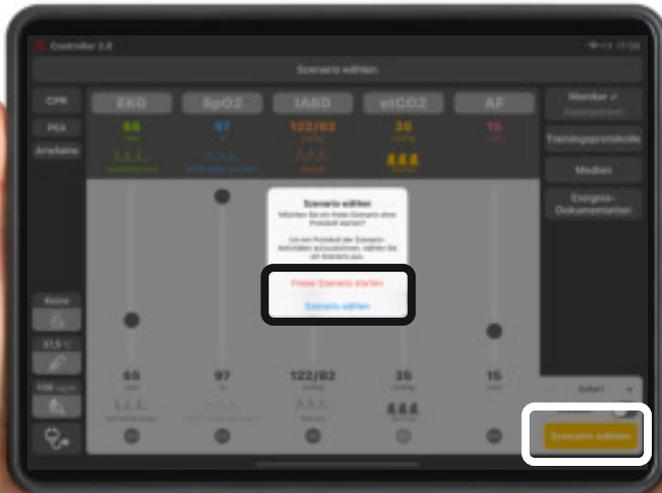

3.

Login qubeCLOUD

ANMELDUNG IN DER QUBECLOUD



Um sich mit der qubeCLOUD zu verbinden und die erstellten Szenarien zu laden, Tippen Sie auf Szenario starten und anschließend auf Szenario auswählen.

Sie werden aufgefordert sich einzuloggen, geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail) und das Passwort ein.




Nach erfolgreichem Login, werden die Szenarien auf Ihren Controller geladen. Wählen Sie das gewünschte Szenario aus und tippen auf den grünen Startknopf.

4.

Szenario steuern

STEUERN SIE IHR SZENARIO

1. Vitalwerte wählen & verändern

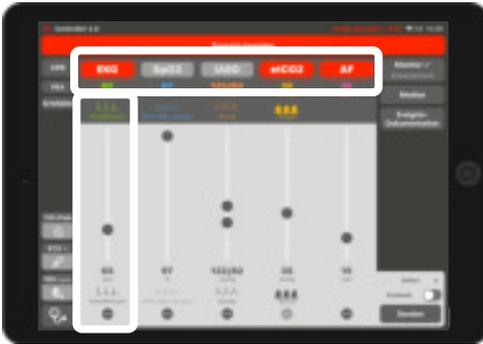

2. weitere Optionen



3. Vitalwerte senden & Trendzeiten festlegen



4. Szenario beenden





skillqube.com/support



SKILLQUBE®
Training

Schafäckerweg 24
69168 Wiesloch

www.skillqube.com
info@skillqube.com