

Benutzerhandbuch qubeAVgo





ALLGEMEINES	3
LIEFERUMFANG	3
EINRICHTUNG DES qubeAVgo SYSTEMS	3
STARTEN DER APPLIKATION	4
<i>APPLIKATION ÖFFNET SICH</i>	4
<i>ICONS UND EINSTELLUNGEN</i>	4
WEITERE INFORMATIONEN	7
IHRE ANSPRECHPARTNER	7
IMPRESSUM	7



ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Sie sich für das Audio-Video System qubeAVgo entschieden haben. Es ist uns als Entwickler und Hersteller von Simulationstechnik ein großes Bedürfnis, allen Beteiligten ein Trainingserlebnis zu ermöglichen und somit in vielen Bereichen des Lernzyklus einen Mehrwert zu generieren.

Betrachten Sie sich nicht nur als Anwender einer bestehenden Lösung, sehen Sie sich vielmehr als Teil eines Entwicklungsprozesses. Wir treten an Sie mit der Bitte heran, uns über Ihre Bedürfnisse und Optimierungen zu informieren, damit wir die Möglichkeit haben, das bestehende Produkt mit Ihrer Unterstützung weiter zu entwickeln. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in Ihren Trainings.

LIEFERUMFANG

Das qubeAVgo System wurde Ihnen mit folgenden Komponenten zugestellt:

- qubeAVgo Rucksack
- iPad mit konfigurierter qubeAVgo Applikation
- Apple iPad Pen
- IP Kamera konfiguriert mit Netzteil
- LAN Kabel
- Router konfiguriert mit Netzteil
- Mikrofon (Grenzfläche)
- Vorverstärker / Signalwandler
- Bedienungsanleitung
- Router- / Netzwerkkarte mit allen Informationen (Passwörter)

EINRICHTUNG DES qubeAVgo SYSTEMS

Sie erhalten Ihr qubeAVgo System vollständig konfiguriert. Es braucht nur wenige Schritte und Sie können mit Ihrem AV System loslegen.

1. Schließen Sie den mitgelieferten WLAN Router an einer Energiequelle (Steckdose) an.
2. Schließen Sie die mitgelieferte IP Kamera an einer Energiequelle (Steckdose) an.
3. Starten Sie das iPad und achten Sie darauf, dass sich dieses im Netzwerk des mitgelieferten Routers befindet. Sollten dies nicht der Fall sein, gehen Sie zu den Einstellungen → WLAN → und wählen Sie das vorkonfigurierte Netzwerk aus (Netzwerkname und Passwort entnehmen Sie der beigelegten Router- / Netzwerkkarte)
4. Wenn sich alle Komponenten im Netzwerk befinden, können Sie direkt starten



Hinweis: Sie erreichen eine höhere Verbindungsstabilität, wenn Sie die IP Kamera mit dem Router verbinden. Verwenden Sie dafür das mitgelieferte LAN Kabel

STARTEN DER APPLIKATION


Wenn sich alle Komponenten im gleichen Netzwerk befinden, öffnen Sie die Applikation durch drücken des App-Icons



APPLIKATION ÖFFNET SICH

Wenn Sie das Icon der qubeAVgo betätigt haben, öffnet sich die Applikation und beginnt den Ladevorgang. Dieser dauert ca. 7 Sekunden.

ICONS UND EINSTELLUNGEN

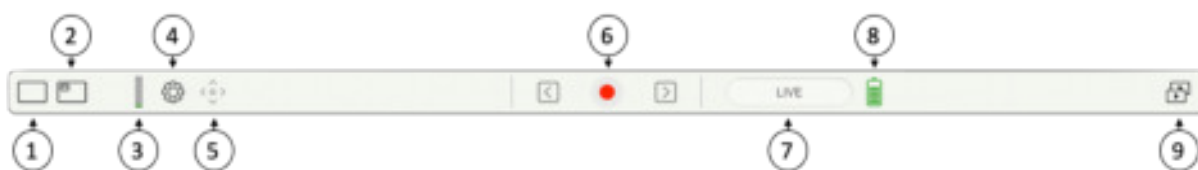

1. Auswahl der Hauptansicht

Wenn Sie die mitgelieferte Kamera wählen, besteht die Möglichkeit, die Bildwiedergabe zu flippen. Das bedeutet, dass das Kamerabild um 180 Grad gedreht wird. Dies ist bei einer Deckenmontage zu empfehlen.

2. Auswahl des Picture in Picture (PiP)

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, ein Picture in Picture (PiP) Bild einzustellen. Über einen Stream haben Sie die Möglichkeit, den SKILLQUBE Patientenmonitor einzublenden. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass sich der Monitor im identischen Netzwerk wie die qubeAVgo befindet.

3. Equalizer

Der Equalizer zeigt an, ob das übertragene Audiosignal übersteuert wird.

4. Einstellungen

Pre-roll: Einstellung, um wie viele Sekunden der Marker vorgesetzt werden soll. Bereich 1-5 Sekunden.

FAQ: Direkte Weiterleitung zur FAQ Seite auf www.skillqube.com. Eine Internetverbindung ist zwingend erforderlich.

About: Anzeige der Versionsnummer der Applikation und Informationen der verwendeten Open Frameworks.



5. Kamerasteuerung

Bei der mitgelieferten externen Kamera kann das Bild beliebig eingestellt werden; Blickrichtung und Blickwinkel sind steuerbar. Ziehen Sie den digitalen Joystick (Punkt) nach links, rechts, oben oder unten, um die gewünschte Bildeinstellung zu erhalten. Der Regler links bietet die Möglichkeit, ein Zoom einzustellen. Die Steuerung der Kamera ist auch während der Aufzeichnung möglich.

6. Record

Mit Betätigung des Record-Buttons starten Sie eine neue Aufnahme.

7. Statusanzeige


Zeigt an, in welchem Modus (LIVE) sich die Applikation befindet (LIVE, REC, REPLAY)

8. Batteriestatus

Anzeige des Batteriezustandes des iPads. Ab 20% wird die Statusanzeige rot. Dies signalisiert, dass das iPad geladen werden muss oder an eine Stromversorgung angeschlossen werden sollte.

9. Aufnahmen

Gespeicherte Aufnahmen werden im Archiv abgelegt. Durch Wischen nach links kann die Aufnahme gelöscht oder geteilt werden. Möchten Sie eine Aufnahme teilen, wird ein mp4 File erstellt. Dies dauert ca. ein Viertel der Zeit der Gesamtaufnahme. Durch einfaches Tippen wird die Aufnahme in der App geladen.

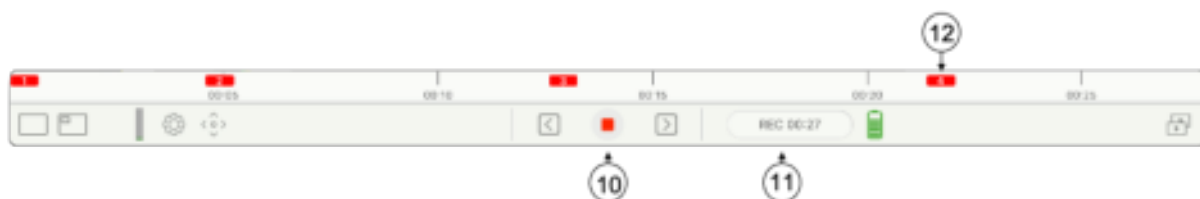

10. Stopp

Durch betätigen des „Stopp“-Buttons öffnet sich der Dialog mit folgenden Möglichkeiten

„Weiter aufnehmen“ – Die Aufnahme wird fortgeführt

„Beenden“ – Die Aufnahme wird beendet. Die Applikation wechselt automatisch in den REPLAY-Modus

11. Statusanzeige

Anzeige des aktuellen Modus (im Record-Modus mit Zeitangabe)



12. Marker

Um Marker zu setzen, schreiben Sie mit dem Apple-Pen in das laufende Bild. Der Marker wird in der von Ihnen gewählten Farbe in der Zeitleiste angezeigt.

13. Notizen Schrittweise entfernen

14. Entfernen rückgängig machen

15. Ganze Notiz löschen und neu beginnen


16. Farbauswahl des Stiftes.
Slider bewegen zur Farbauswahl

17. Stift ist aktiv in gewählter Farbe


18. Radiergummi inaktiv

19. Notizen bestätigen und speichern

20. Ohne Notizen abbrechen.

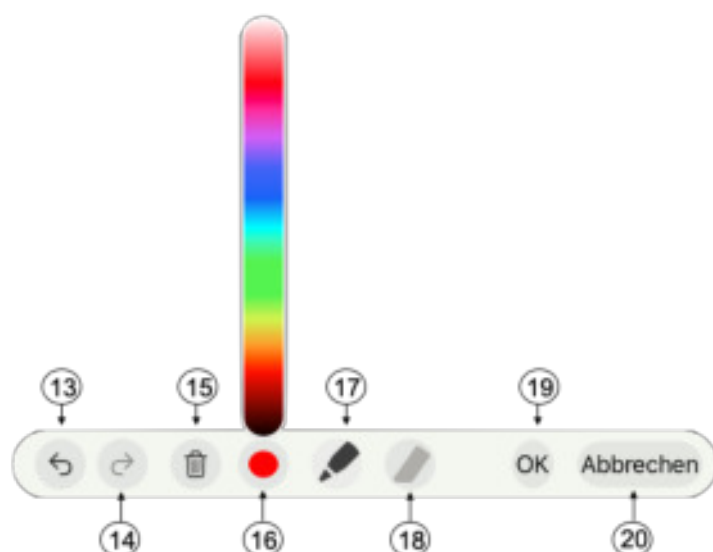

Nach Beendigung der Aufnahme wechselt die Applikation in den REPLAY-Modus

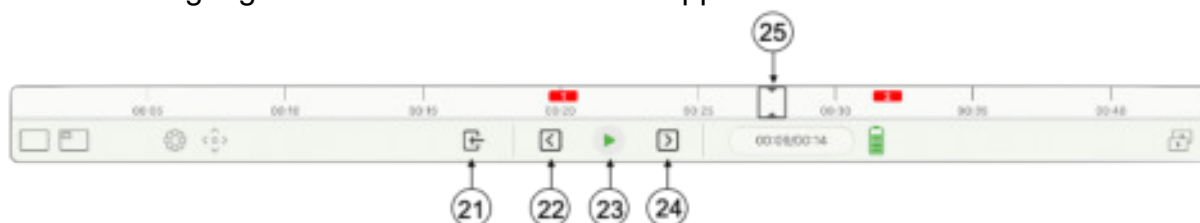

21. Timeline-Marker

Bewegen Sie den Timeline-Marker an eine beliebige Stelle der Wiedergabe

22. Live Modus

Durch betätigen des Live Modus Buttons startet der Live Modus neu. Es erfolgt eine Abfrage, ob die Aufnahme im Archiv gespeichert werden soll

23. Tabulator „Rückwärts“

Vorigen Marker ansteuern

24. Play

Startet die Wiedergabe

25. Tabulator „Vorwärts“

Vorwärtsliegenden Marker ansteuern.



WEITERE INFORMATIONEN

Sie finden unter www.skillqube.com/support/faq-qubeavgo/ die aktuellsten Bedienungshandbücher zu den entsprechenden Versionen der Applikation

Zusätzlich stehen auf der Internetseite Anwender Tutorials zur Verfügung, welche die Bedienung der qubeAVgo Schritt für Schritt beschreiben

Dort befinden sich ebenfalls eine Verlinkung zu unserem Meldeportal, sollten Störungen der Applikation vorliegen

IHRE ANSPRECHPARTNER

SKILLQUBE GmbH, Schafäckerweg 24, D-69168 Wieslich

Tel. +49 6222 /386265, Mail: info@skillqube.com

SKILLQUBE GmbH, Alte Spinnerei, Unterghet 1531, CH-8877 Murg

Tel. +41 44 521 36 53, Mail: info@skillqube.ch

IMPRESSUM

SKILLQUBE GmbH
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Deutschland

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968
Sitz Wiesloch – Geschäftsführerin: Julia Wallburg, Prokuristen: Georg Hirsch,
Thorben Schreyer

e-Mail: info@skillqube.com
Homepage: www.skillqube.com

Tel.: 06222 / 38 62 65
Fax.: 06222 / 38 63 65

USt-IdNr. DE 289937847

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter skillqube.com/impressum abrufen.