



Manual de usuario qubeCPRFeedback



Estado a 21/10/2020



INDICACIONES GENERALES	3
DESECHAMIENTO	3
ACTUALIZACIONES	3
AJUSTES DEL SISTEMA	3
ABRIR EL CENTRO DE CONTROL	3
ESTABLECER CONEXIÓN WLAN	3
MANEJO DEL SOFTWARE	4
CALIBRADO DEL SENSOR	6
CPR POD	6
AVISO LEGAL	7



INDICACIONES GENERALES

DESECHAMIENTO

Puesto que nuestros envíos pueden incluir pilas y baterías, en conformidad con la Ley alemana de baterías (BattG), tenemos la obligación de indicarle lo siguiente:

No se permite desechar pilas y baterías en la basura doméstica. Las pilas viejas pueden contener sustancias nocivas que, en caso de almacenamiento o desechamiento incorrecto, pueden perjudicar el medio ambiente o su salud. Sin embargo, las pilas también contienen materias primas importantes, como hierro, cinc, manganeso o níquel, y pueden reutilizarse.

Puede devolvernos las pilas una vez usadas o entregarlas de forma gratuita cerca de usted (por ejemplo, en el comercio o en puntos de recogida municipales, o bien en nuestro almacén de envíos). La entrega en puntos de venta se limita a las cantidades habituales para consumidores y a las pilas viejas que el distribuidor venda o vendiera antes como nuevas en su catálogo.

ACTUALIZACIONES

Por favor, no lleve a cabo actualizaciones a nuevos sistemas operativos del fabricante de tablets Apple sin que SKILLQUBE las autorice. No obstante, le rogamos que actualice periódicamente la aplicación para que podamos garantizar la funcionalidad y compatibilidad completas. En caso de dudas o problemas técnicos, puede encontrar ayuda en www.skillqube.com/support.

AJUSTES DEL SISTEMA

Con la qubeSERIE, tiene la posibilidad de adaptar los ajustes predefinidos tanto en todos los monitores como en el controlador. Aquí se cuentan, por ejemplo, el modificar las unidades de temperatura, respiración y azúcar en sangre o el ajuste de la duración de la reanimación del DEA en los monitores.

ABRIR EL CENTRO DE CONTROL

Para abrir, pase el dedo del borde inferior al superior de cualquier pantalla. En un iPad con IOS 12 o un sistema más reciente, pase de la esquina superior derecha de la pantalla hacia abajo. En las versiones más antiguas, toque de abajo hacia arriba.

ESTABLECER CONEXIÓN WLAN

Antes de comenzar con la simulación, asegúrese de que el controlador, el monitor y el dispositivo de evaluación se encuentren en la misma red WLAN. Para ello, vaya en la pantalla Inicio a Ajustes > WLAN y seleccione la red correspondiente. Repita este paso en todos los dispositivos.



MANEJO DEL SOFTWARE

CONECTAR SISTEMAS

Para conectar correctamente los sistemas, saque el sensor del cargador y asegúrese de que la batería del sensor no esté descargada. En el siguiente paso, conecte su controlador con el monitor. Después de una correcta conexión, ahora debería ver la interfaz como en la siguiente imagen.






En el siguiente paso, coloque el sensor cerca del monitor para establecer una conexión. Para ello, seleccione la pestaña Menú en el controlador y pulse el «Sensor de RCP». (Si se utiliza el feedback de RCP por primera vez en el monitor empleado, este pedirá permiso para que la aplicación acceda a Bluetooth. Confírmelo con «OK»).



El monitor encontrará ahora todos los sensores en las inmediaciones, ¡para ello debe estar activado el Bluetooth! Ahora, pulse Conectar y, al principio, el sensor seleccionado parpadeará brevemente.

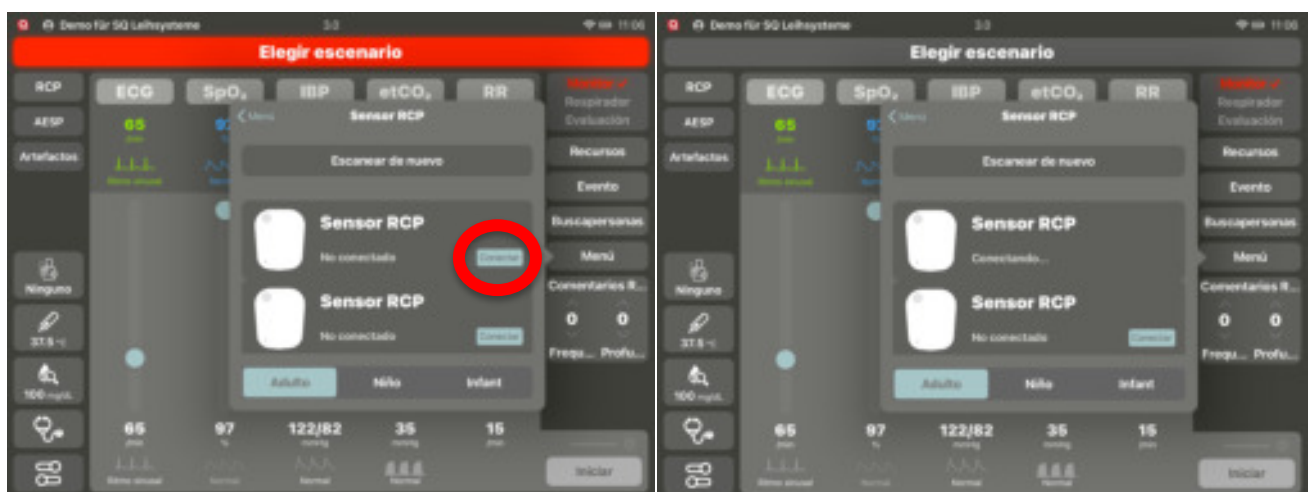

CALIBRADO DEL SENSOR

Si el sensor de feedback de RCP se conecta por primera vez con el sistema, este necesitará un calibrado. Se abre una ventana a través de la cual es posible iniciar directamente el calibrado.

Al volver a conectar, el sensor verificará si este debe volver a calibrarse. Si el sensor necesita un calibrado, volverá a aparecer una ventana.



CPR POD

Tan pronto como haya conectado correctamente el sensor y tampoco sea necesario ningún calibrado más, inserte el sensor en el «pod» de RCP incluido en el suministro. Para ello, preste atención a que el sensor esté correctamente orientado, la parte superior deberá apuntar hacia arriba en el «pod».



INCORRECTO



CORRECTO



AVISO LEGAL

SKILLQUBE GmbH
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Alemania

Juzgado Municipal – Tribunal de registro – Mannheim HRB 716968
Sede en Wiesloch – Directora general: Julia Wallburg, apoderados: Georg Hirsch, Thorben Schreyer

Correo electrónico: info@skillqube.com
Sitio web: www.skillqube.com

Tel.: 06222 / 38 62 65
Fax.: 06222 / 38 63 65

N.º ID IVA: DE 289937847

Puede consultar nuestras condiciones generales del contrato en todo momento en skillqube.com/impressum.