

## Release Notes - Version 3.2



Liebe **Simulations Community**,

ab sofort stehen Euch für die EKG-Patientenmonitor Simulatoren neue Updates zur Verfügung. Mit der neuen Version wird die Performance in allen Komponenten der qubeSERIE verbessert und zahlreiche neue Funktionen stehen ab sofort zur Verfügung. Nachfolgend haben wir für Euch die wichtigsten Änderungen und Anpassungen zusammengestellt.

Weitere Informationen findet Ihr auch unter [www.skillqube.com/support](http://www.skillqube.com/support)

---

### qube**CONTROLLER**

- Erstellen und Versenden von Laborwerten
- Der Controllernamen wird beim Verbinden mit einem Monitor angezeigt
- Fehlermeldungen beim Verbinden mit der qubeCLOUD wurden überarbeitet
- Anpassungen beim UI & UX
- EKG Wellen werden auch bei Trendzeit direkt gesendet
- Korrektur verschiedener EKG Rhythmen (u.a. AV-Blöcke)
- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



## qube<sup>3</sup>

- NIBD wurde um Qualitätsaspekt bei der Messung ergänzt (Sternebewertung)
- Das Diagramm für die nächste Defibrillation wurde ergänzt
- Optische Anpassungen auf die aktuelle Version
- Im AED und Defi können die Wellenformen und Numerischen Werte frei konfiguriert werden
- Die Herzfrequenz wird nicht mehr angezeigt wenn nur SpO2 angeschlossen ist
- Der Metronom ist lauter eingestellt
- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



## qube<sup>3T</sup>

- NEU: qube3T auf Basis des Corpuls3Touch, sprechen Sie uns an um mehr zu erfahren!



## qube<sup>15</sup>

- Im CPR/Defimodus werden alle Alarme stummgeschaltet
- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



## qube<sup>7</sup>

- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



## qube<sup>x</sup>

- Überarbeitung der Darstellung für mehr Stabilität
- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



---

## qubeASSESSMENT

- Der Blutdruck kann für die erste Messung an die Assessment Software gesendet werden
- Es können Laborberichte empfangen und angezeigt werden
- Allgemeine Performanceverbesserung und Update auf iOS 14



# Aktualisieren von Apps auf Ihrem iPad oder iPod

Stellen Sie eine Internetverbindung mit den Geräten her.

## 1. qube**CONTROLLER**

Öffnen Sie den App Store auf dem iPad und tippen Sie oben im Bildschirm auf Ihr Profilsymbol.

Scrollen Sie, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Wenn Sie nur die qubeCONTROLLER App aktualisieren möchten, tippen Sie auf “Aktualisieren” neben dieser App. Alternativ können Sie auch “Alle aktualisieren” tippen.

Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.

## 2. qube**MONITOR** (qube<sup>3</sup>, qube<sup>3T</sup>, qube<sup>15</sup>, qube<sup>7</sup>, qube<sup>X</sup>)

Öffnen Sie den App Store auf dem iPad und tippen Sie oben im Bildschirm auf Ihr Profilsymbol.

Scrollen Sie, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Wenn Sie nur die Monitor App aktualisieren möchten, tippen Sie auf “Aktualisieren” neben dieser App. Alternativ können Sie auch “Alle aktualisieren” tippen.

Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.

## 3. qube**ASSESSMENT**

Öffnen Sie den App Store auf dem iPod und tippen Sie oben im Bildschirm auf Ihr Profilsymbol.

Scrollen Sie, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Wenn Sie nur die qubeASSESSMENT App aktualisieren möchten, tippen Sie auf “Aktualisieren” neben dieser App. Alternativ können Sie auch “Alle aktualisieren” tippen.

Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.

Sollten unerwartete Probleme auftreten, dann kontaktiere uns unter [support@skillqube.com](mailto:support@skillqube.com)