

qubeSERIE

# QUICK START GUIDE



# WILLKOMMEN BEI SKILLQUBE!

Es freut uns sehr, dass Ihr nun ein Teil des weltweiten Netzwerks von SKILLQUBE geworden seid.

Wir bei SKILLQUBE haben es uns zur Aufgabe gemacht die Simulation in der (prä-)klinischen Medizin zu revolutionieren. Mit unserer Mission360 möchten wir mit maßgeblichem Input alle Bereiche des Lernens nachhaltig unterstützen, dabei ist der Kreislauf des Lernens das Zentrum unserer Mission. Hierzu bieten wir neben den Simulationssystemen der qubeSERIE, zudem unsere EKG-Simulatoren, Beatmungssimulatoren und

Audio-Video Debriefing-Systeme zählen, auch realistische Simulations Phantome wie die SIMBODIES an. Neben AHA-Zertifizierten Trainings wie ACLS, PALS und BLS bieten wir auch eigene Simulations-Trainer Kurse an.

In die Entwicklung unserer Simulationsprodukte haben wir unsere Erfahrung und unser Herzblut gesteckt mit dem Ziel Ihnen ein möglichst erfolgreiches Trainingserlebnis zu bieten.

Auch wir entwickeln uns stetig weiter und erweitern dabei unsere Produkte, damit Simulationen ein Teil Ihres Alltags werden können.

**SKILLQUBE** - Innovation aus Leidenschaft

---

# ALLGEMEINES

## APPLE GERÄTE BEDIENEN

### Kontrollzentrum öffnen

Zum Öffnen streichen Sie auf einem iPad mit iOS 12 oder neuer auf dem Bildschirm von oben rechts nach unten. Bei älteren Versionen streichen Sie von unten nach oben.



### WLAN Verbindung herstellen

Bevor Sie mit der Simulation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich Controller, Monitor und Assessment im gleichen WLAN befinden. Gehen Sie hierzu zu auf den Home-Bildschirm > Einstellungen > WLAN und wählen das entsprechende Netzwerk aus. Wiederholen Sie dies auf allen drei Geräten.



### Software Updates

Halten Sie Ihre Software immer auf dem neusten Stand!

# 1



VIDEO TUTORIAL

# GERÄT VERBINDEN

HERSTELLEN EINER VERBINUNG



Wenn Sie den Controller und den Monitor verbinden möchten, tippen Sie rechts oben auf den rot blinkenden „Gerät verbinden“ Button.



Durch das Tippen öffnet sich eine Ansicht mit allen verfügbaren Geräten in der Umgebung. Suchen Sie Ihren Monitor und wählen diesen aus.



Sie werden auf dem Monitor aufgefordert, den Controller mit dem Monitor zu verbinden. Sind die Geräte miteinander verbunden, wird dies durch einen grünen Rahmen um die zwei Screens bestätigt.



SKILLOUBE®  
Training

2

---

# SZENARIO STARTEN

## FREIES SZENARIO STARTEN

Um ein freies Szenario zu starten, drücken Sie rechts unten auf Szenario starten. Das freie Szenario startet sofort.

Wenn Sie ein vorhandenes Szenario aus der qubeCLOUD laden möchten, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.



# 3



VIDEO TUTORIAL



---

# LOGIN qubeCLOUD

ANMELDUNG IN DER QUBECLOUD



Um sich mit der qubeCLOUD zu verbinden und die erstellten Szenarien zu laden, Tippen Sie auf den Button „Szenario wählen“. Sind sie nicht eingeloggt, werden Sie aufgefordert dies zu tun. Geben Sie Benutzernamen (E-Mail) und das Passwort ein.



Nach erfolgreichem Login, werden die Szenarien auf Ihren Controller geladen. Wählen Sie das gewünschte Szenario aus und tippen auf den Startknopf (Laden) am unteren Bildschirmrand.



SKILLOUBE®  
Training

4

---

# SZENARIO STEuern

STEUERN SIE IHR SZENARIO

1. Vitalwerte wählen & verändern




2. weitere Optionen



3. Vitalwerte senden &  
Trendzeiten festlegen



4. Szenario beenden

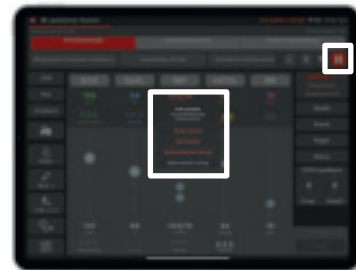



**Skillqube GmbH**  
Hohenaspen 20  
69231 Rauenberg

[info@skillqube.com](mailto:info@skillqube.com)  
[www.skillqube.com](http://www.skillqube.com)

Tel.: 06222 / 38 62 65  
Fax.: 06222 / 38 63 65