

Release Note Version 3.3.3

UPDATE
3.3



SKILLQUBE®
Training

qubeSERIE Update 3.3.3

Veröffentlicht zum: 10.11.2021

qubeSERIE

Software für iOS 15 offiziell freigegeben

Vor kurzem hat Apple ein neues Betriebssystem für seine Geräte vorgestellt und veröffentlicht. Wir haben die Kompatibilität unserer Software sichergestellt und können Ihnen nun ein Update auf das neue Betriebssystem iOS 15 von Apple empfehlen.

Bei weiteren Updates des Betriebssystems **bitte beachten!**

Wir bitten Sie neue Updates nicht direkt aufzuspielen, da wir zunächst immer unsere Software auf dem neuen Betriebssystem testen möchten um möglich auftretende Fehler auszumerzen. Wir informieren Sie, sobald ein Update der Betriebssoftware problemlos erfolgen kann.

Optimierungen:

- Verbesserung der Übersetzungen
- Bugfixes und allgemeine Performance Verbesserungen

UPDATE 3.3



SKILLQUBE®
Training

NEW RELEASE

NEU Mediocenter für alle Monitore der qube**SERIE**

Empfangen Sie Medien wie z.B. den Ausdruck des 12-Kanal EKG über das Mediocenter am Monitor.


VERBESSERT qubeCPR

Damit Sie künftig noch einfacher Ihre qubeCPR Sensoren zuordnen können werden diese farblich und numerisch im Controller gespeichert.

OPTIMIERUNG:

- Optimierungen an der Sound Engine
- Login Dialog optisch angepasst
- Fehler korrigiert bei dem SpO2 auf 101% steigen konnte
- Optimierung der Wellenform SpO2 für das realistische Anzeigen von Druckschwankungen
- Optimierungen für den Bereich Support
- Allgemeine Performance Verbesserungen

qube^{ZERO}

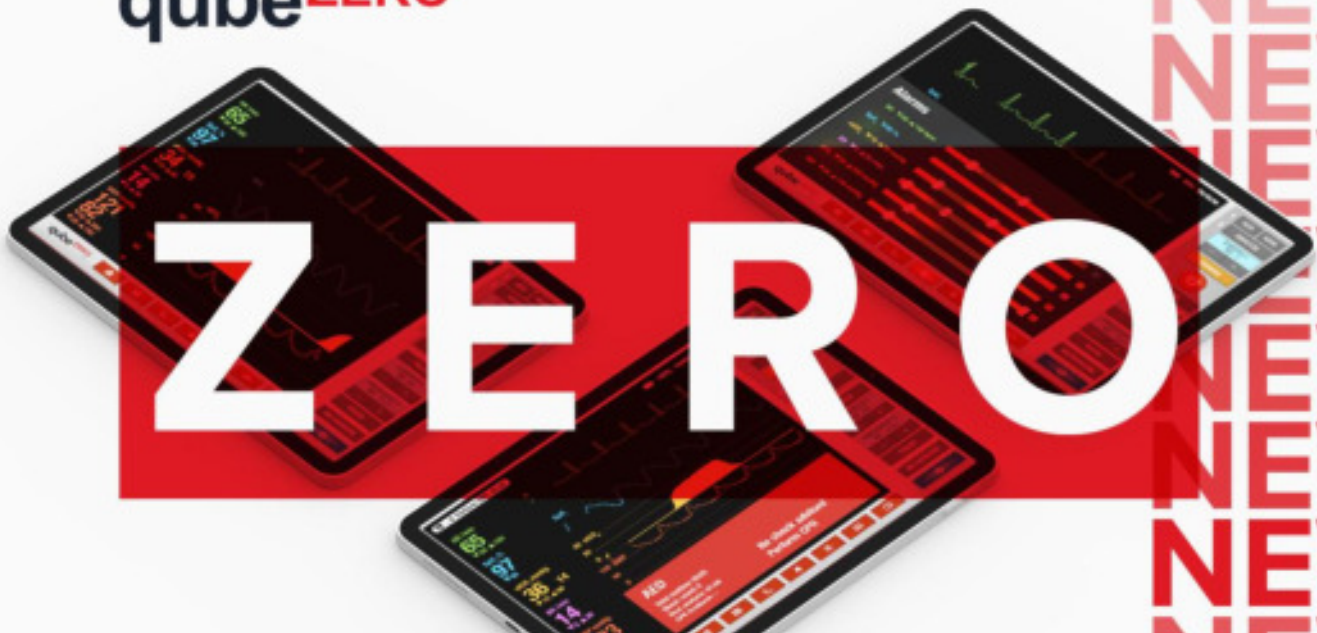

NEU qube^{ZERO}:


Die leistungsfähige generische Monitoroberfläche von SKILLQUBE!

- Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten inkl. klinisch, numerisch und präklinisch
- 12 Kanal EKG
- Pacer
- AED und manueller Defibrillator
- CPR Feedback integration
- Metronom im Reanimationsmodus
- Mediocenter

qube^{CONTROLLER}

NEU:

- Portrait Modus wurde deaktiviert
- App kann nicht versehentlich zu den AppSettings oder zu den FAQ verlassen werden
- Das Sensor Kalibrierungsmenü kann nun ohne Kalibrierten Sensor verlassen werden
- Vergrößern der Medien in der Vorschau zur besseren Darstellung jetzt möglich
- Das drücken von Analyse deaktiviert die Artefakte und behebt damit ein UX issue

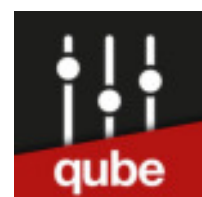

So erreichen Sie uns bei Fragen:

Mail: support@skillqube.com
Service-Hotline: +49 (0)6222 – 38 62 65
Web: www.skillqube.com/support

qube³ / qube^{3T}

NEU:

- Ladeton für den qube3 /qube3T
- Funktionserweiterung für das Tortendiagramm für die Reanimation
- Automatische Erkennung der Ableitung II oder Pads

Optimierung:

- EtCo2 wird nun auch im Defi/CPR Modus dargestellt
- Sprachanweisung im qube3 / qube3T optimiert

Bugfix:

- Fehlerbehebung bei PADS und Synchronisierter Kardioversion



qube¹⁵

Optimierung:

- Ist SpO2 aktiviert wird keine Herzfrequenz mehr dargestellt, anstelle die SpO2 (PP)

Bugfix:

- Falsche Funktionalität berichtigt (laden des Defi über Dreh-Drückrad)



qube⁷

NEU:

- Anpassungen auf SOFT8 von SCHILLER
- PACER auf Soft 8 angepasst

Optimierung:

- Die Alarm LED leuchtet nun auch bei Alarmen
- Darstellung im Manuellen Defi Angepasst
- Darstellung der Blutdruckmessung angepasst



qube^X

NEU:

- Integration der IABD Messung

Optimierung:

- Funktionalität beim Einschalten überarbeitet
- Anpassungen beim Öffnen des Pacer Menüs



qube^{Assessment}

Optimierung:

- Bei Laboren werden jetzt auch Referenzwerte angezeigt
- Bugfix für iOS 12.5

