

SKILLQUBE

# qubeAIRFLOW

Stand 01.2025

Nur zu Trainingszwecken geeignet



## qubeAIRFLOW

Der Beatmungssensor von SKILLQUBE unterstützt Sie beim Training der manuellen Beatmung. **Dieser ist nur für Trainingszwecke geeignet.** Der qubeAIRFLOW Sensor verfügt dabei über folgende Funktionen:

- Erfassen von VT inspiratorisch
- bedingt expiratorisch Vte
- Erfassen der Atemfrequenz

## qubeAIRFLOW verbinden

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und verbinden Sie wie gewohnt den Controller mit dem Monitor. Schalten Sie den qubeAIRFLOW ein. Sobald dieser bereit ist, leuchtet er grün.

Im Verbindungsmenü des Controllers können Sie, nach dem erfolgreichen Verbinden des Monitors, nach dem Sensor suchen. Der qubeAIRFLOW wird Ihnen anschließend angezeigt und durch einfaches Tippen wird dieser verbunden. Bei erfolgreicher Verbindung verändert sich die Farbe des LED Lichtes von grün zu blau und der Sensor kann verwendet werden.

## qubeAIRFLOW verwenden

Die Daten des Sensors werden an das CPR Dashboard des Controllers gesendet und dort sowohl grafisch als auch numerisch angezeigt.



## Laden des Akkus

Das Gerät wird an der Seite mit einem USB-Micro Kabel geladen. Dieses ist im Lieferumfang enthalten. Das Kabel kann an jeden herkömmlichen USB-Ladeanschluss angeschlossen werden.

Verwendet wird ein Lithium-Polymer Akku mit 1000mAh

## Funktionen der LED-Signale

| Farbe    | Schema                                             | Status                                        |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hellblau | Ansteigend & 2x blinkend (nach dem Einschalten)    | Gerät startet, bitte warten                   |
| Grün     | Dauerhaft leuchtend                                | Gerät eingeschaltet und bereit zur Verbindung |
| Blau     | Dauerhaft leuchtend                                | Gerät verbunden                               |
| Orange   | Dauerhaft leuchtend (beim Laden)                   | Gerät lädt                                    |
| Orange   | 5x blinkend (direkt nach dem Einschalten)          | Interner Fehler, bitte an den Support wenden  |
| Rot      | Dauerhaft blinkend (nach hergestellter Verbindung) | Interner Fehler, bitte an den Support wenden  |

## Kontakt

SKILLQUBE GmbH

Hohenaspen 20

69231 Rauenberg

[info@skillqube.com](mailto:info@skillqube.com)

[www.skillqube.com](http://www.skillqube.com)

