

Ambu[®] X SKILLQUBE



Anleitung

User-Guide für das Verbinden der qube**AVgo** (Software-Version 3.0.0)
mit dem AmbuMan[®] Wireless (Software-Version 1.2.1)

SKILLQUBE

Anleitung

Verbindung zwischen Ambu® und SKILLQUBE

Es gibt zwei Möglichkeiten, den AmbuMan® mit der qubeAVgo zu verbinden.


Methode 1:

Geräte einschalten

- Schalten Sie den AmbuMan® über die **EIN / AUS** - Taste ein.
- Richten Sie Ihre qubeAVgo und, falls vorhanden, weitere SKILLQUBE Simulationsmonitore wie gewohnt ein.


Netzwerkverbindungen herstellen:

1. Verbinden Sie Ihre qubeAVgo mit dem Router des qubeAVgo-Systems.
2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem WLAN des AmbuMan®.
3. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie **192.168.1.1/config#/** in die Suchleiste ein, um auf die Einstellungsseite des AmbuMan® zu kommen.

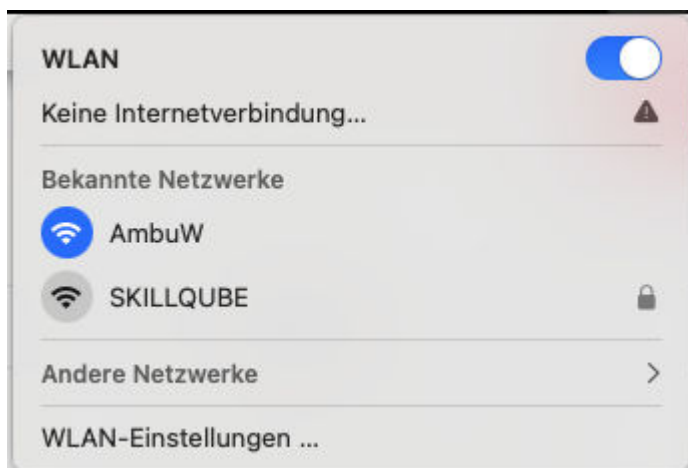

AmbuMan® WLAN-Einstellungen anpassen:

1. Auf der Einstellungsseite des AmbuMan® suchen Sie den Bereich **Netzwerkeinstellungen**.
2. Unter **Netzwerkmodus** wählen Sie die Option **WLAN**.
3. Geben Sie folgende WLAN-Daten ein:
 - a. **SSID:** Tragen Sie hier den Namen (SSID) Ihres qubeAVgo-WLANs ein (z.B. 1 WLAN - SKILLQUBE).
 - b. **Passwort:** Geben Sie hier das Passwort für Ihr qubeAVgo-WLAN ein (z.B. 1234567890).

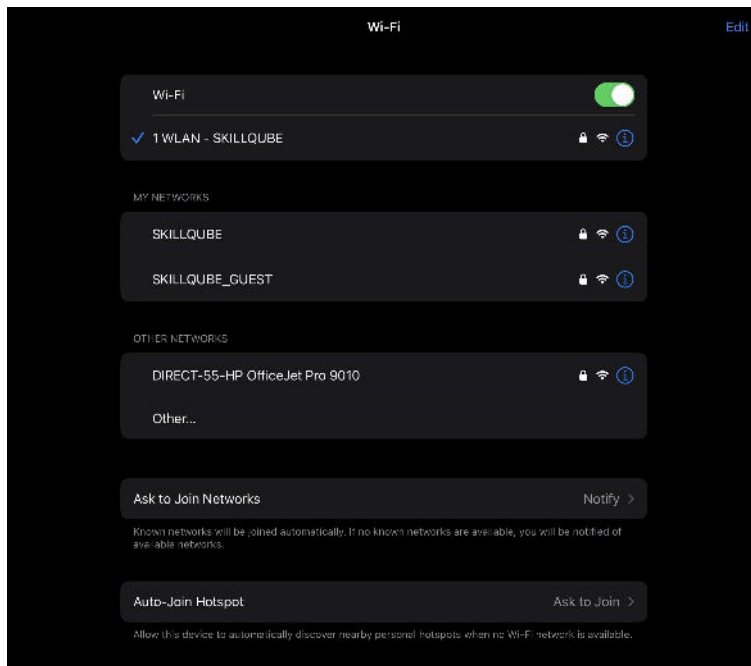

4. Wählen Sie bei **DHCP/DNS** die Option **Client**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen. 


Methode 2:

Geräte einschalten

- Schalten Sie den AmbuMan® über die **EIN / AUS** - Taste ein.
- Richten Sie Ihre qubeAVgo und, falls vorhanden, weitere SKILLQUBE Simulationsmonitore wie gewohnt ein.

Netzwerkverbindungen herstellen:


1. Verbinden Sie Ihre qubeAVgo mit dem Router des qubeAVgo-Systems.
2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem WLAN des AmbuMan®.

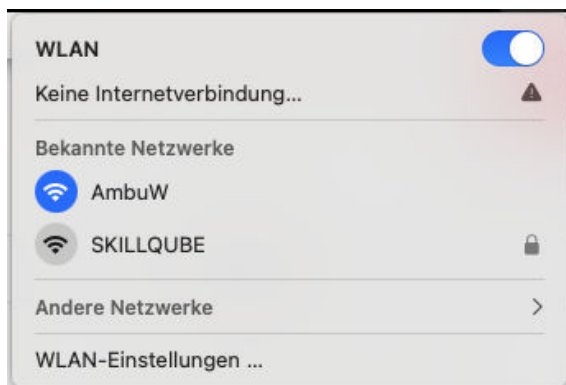

3. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie **192.168.1.1/config#/** in die Suchleiste ein, um auf die Einstellungsseite des AmbuMan® zu kommen.

AmbuMan WLAN-Einstellungen anpassen:

1. Auf der Einstellungsseite des AmbuMan® suchen Sie den Bereich **Netzwerkeinstellungen**.
2. Unter **Netzwerkmodus** wählen Sie die Option **LAN**.
3. Wählen Sie bei **DHCP/DNS** die Option **Client**.

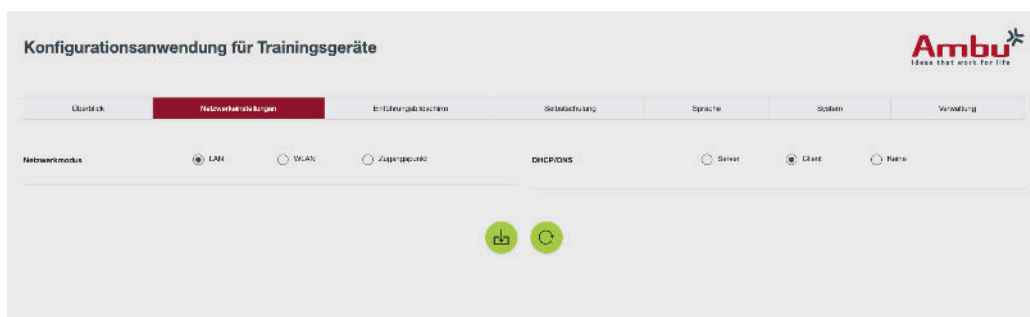

4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.



Physische Verbindung herstellen:

- Verbinden Sie den AmbuMan® nun mit dem qubeAVgo-Router über ein LAN-Kabel.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie nur einen LAN-Port an Ihrem qubeAVgo-Router haben, sodass Sie einen Switch benötigen, um den AmbuMan® und die Kamera der qubeAVgo anzuschließen.



Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
AmbuMan® kann keine Verbindung zum Router herstellen	Wenn der qubeAVgo-Router nicht richtig eingestellt ist, kann dies zu Fehlfunktionen oder einer schwachen WLAN-Verbindung führen.	Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie die qubeAVgo korrekt mit dem Router eingerichtet haben. Bitte halten Sie sich an unseren User Guide für die korrekte Konfiguration des qubeAVgo-Systems.
Einstellungen des AmbuMan® werden nicht geöffnet	Die im Text genannte IP-Adresse 192.168.1.1/config# / kann die Einstellungen Ihres AmbuMan® nicht überprüfen.	Sollten Sie die Standardeinstellungen Ihres AmbuMan® verändert haben, kann dies zu Kompatibilitätsproblemen führen. Für eine genaue Fehlerdiagnose und mögliche Lösungen empfehlen wir Ihnen, den Hersteller Ambu zu kontaktieren.
Schwache WLAN-Verbindung	Unterbrochene oder schwache WLAN-Verbindung über den qubeAVgo-Router, die eine zuverlässige Verbindung zwischen den Geräten verhindert.	Stellen Sie sicher, dass der qubeAVgo-Router an einem Ort positioniert ist, der sowohl von der qubeAVgo als auch vom AmbuMan® eine optimale WLAN-Abdeckung bietet. Eine zu große Entfernung kann zu einer schwachen Verbindung führen. Vermeiden Sie außerdem eine Überlastung des WLANs, indem Sie die Anzahl der verbundenen Geräte begrenzen.

Kontakt

SKILLQUBE GmbH

Hohenaspen 20
69231 Rauenberg
Deutschland

+49 6222 38 62 65
info@skillqube.com
www.skillqube.com

