

Ambu® X SKILLQUBE



Anleitung

User-Guide für das Verbinden der qube**SERIE** (Software-Version 5.1.1)
mit dem AmbuMan® Wireless (Software-Version 1.2.1)

SKILLQ.UBE

Anleitung

Verbindung zwischen Ambu[®] und SKILLQUBE

1. Schalten Sie den AmbuMan[®] über die **EIN / AUS** - Taste ein (siehe Abbildung 1)


Hinweis: Die LED blinkt bei Initialisierung im Startvorgang grün. Leuchtet die LED dauerhaft grün, ist der AmbuMan[®] hochgefahren und hat ein eigenes WLAN-Netzwerk aufgebaut. Der AmbuMan[®] ist dann bereit, eine WLAN-Verbindung mit dem qubeCONTROL und einem Monitor oder qubeASSESS herzustellen.

Abbildung 1: EIN / AUS - Taste



2. Verbinden Sie alle iPads mit dem WLAN des AmbuMan®. Gehen Sie hierfür sowohl auf dem qubeCONTROL als auch auf dem Monitor in die **Einstellungen**, klicken auf **WLAN** und verbinden sich mit dem Netzwerk: **AmbuW**. Sobald der blaue Haken links von **AmbuW** erscheint, ist eine Verbindung hergestellt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: iPad Einstellungen mit erfolgreich verbundenem WLAN **AmbuW**

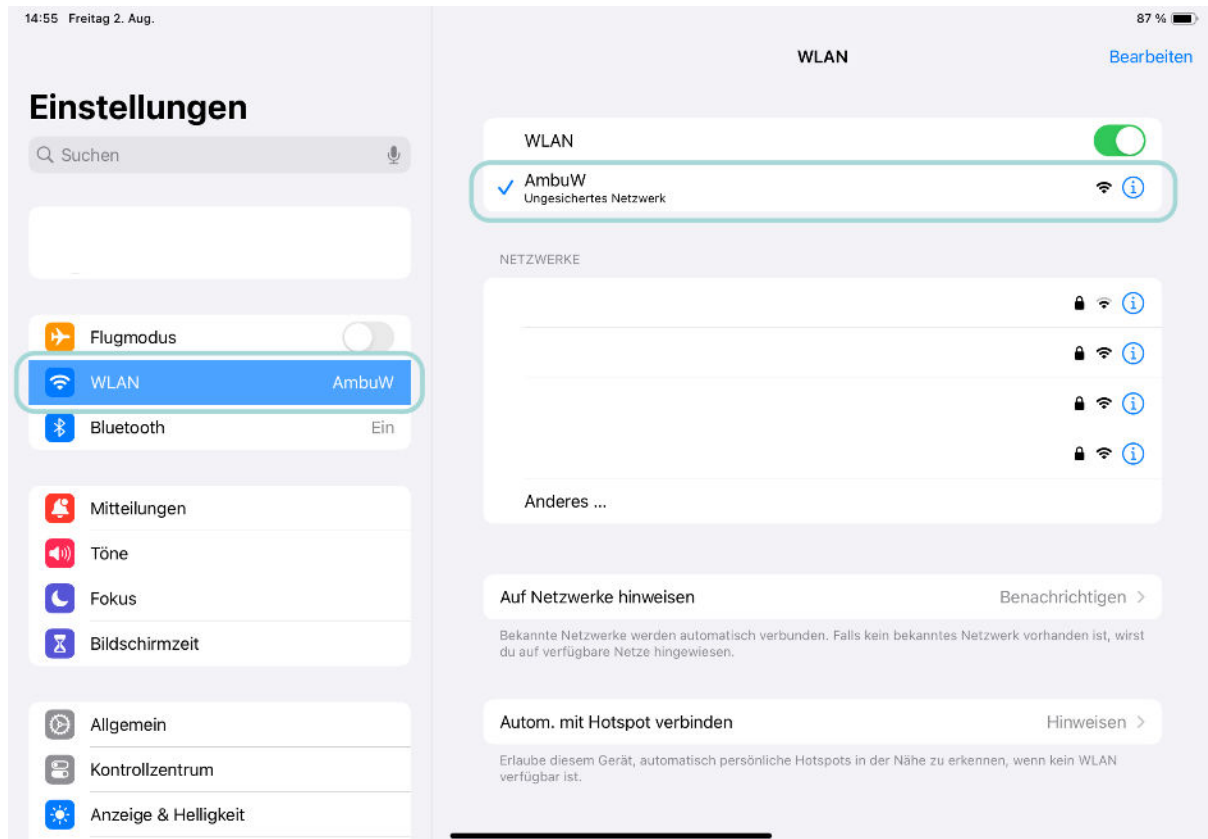

3. Starten Sie nun qubeCONTROL auf Ihrem Instruktor-iPad. Klicken Sie rechts oben im Verbindungscenter auf den Button **Gerät verbinden** und verbinden Sie zuerst Ihren Monitor und anschließend den AmbuMan®.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass der AmbuMan® bei Erstverbindung mit der qubeSERIE erst 15-30 Sekunden nach Verbindung mit dem Monitor angezeigt wird.

Abbildung 3: Verbindungscenter mit NICHT verbundenem qubeC3 und AmbuMan®




4. Jetzt sind Monitor, AmbuMan® und qubeCONTROL miteinander verbunden und können miteinander kommunizieren.

Abbildung 4: Verbindungscenter mit verbundenem qubeC3 und AmbuMan®



Troubleshooting

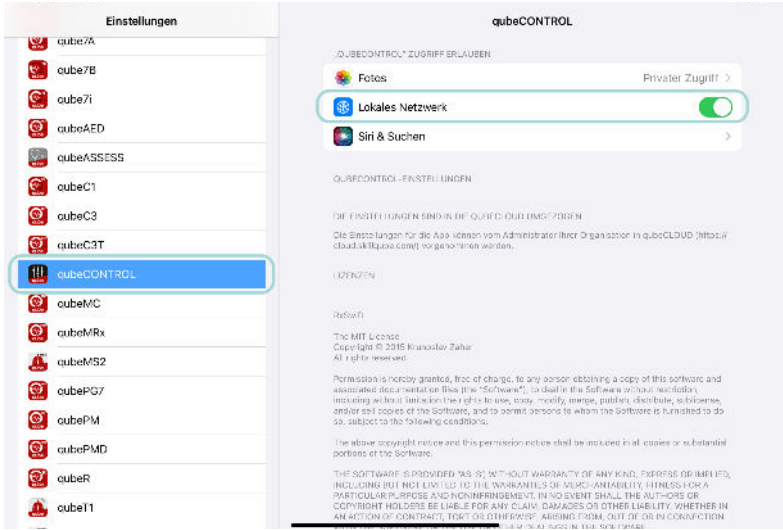
Problem	Mögliche Ursache	Lösung
AmbuMan® wird im Verbindungscenter nicht angezeigt.	Bei Erstkonfiguration des qubeCONTROL öffnet sich ein Popup-Fenster mit folgender Nachricht: „qubeCONTROL möchte Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung herstellen“ Diese App benötigt Zugriff auf das lokale Netzwerk. Hier wurde auf den Button Nicht erlauben geklickt.	In den Einstellungen des iPads sicherstellen, dass der Zugriff der jeweiligen App auf das lokale Netzwerk zugelassen ist. Dazu die Einstellungen des iPads öffnen und auf der linken Seite nach unten scrollen, bis die Controller- App auftaucht. Diese auswählen und auf der rechten Seite sicherstellen, dass Lokales Netzwerk aktiviert ist.
		
AmbuMan® wird im Verbindungscenter nicht mehr angezeigt.	Nach Ausschalten des AmbuMan® oder nach Energieverlust aufgrund von schwacher Batterie ist die WLAN-Verbindung zur qubeSERIE wieder getrennt.	Stellen Sie die Stromversorgung sicher und starten Sie den Verbindungsprozess erneut. Wählen Sie sich mit der qubeSERIE erneut in das AmbuMan-Netzwerk (AmbuW) ein und bauen über den qubeCONTROL eine Verbindung auf.
AmbuMan® sendet nach Schließen von qubeCONTROL	Wenn qubeCONTROL geschlossen oder minimiert	Öffnen Sie qubeCONTROL. Drücken Sie rechts oben auf

keine Daten mehr an den Controller.	wird, wird die Verbindung zum AmbuMan® automatisch getrennt.	den Button (Monitor, Beatmungsgerät, Assessment) und verbinden Sie sich erneut mit AmbuMan®.
AmbuMan® wird im qubeCONTROL angezeigt, lässt sich aber nicht verbinden und es wird keine Fehlermeldung angezeigt.	Es wird ein Hardware-Reset benötigt.	Entfernen Sie die Stromversorgung des AmbuMan® (Batterie) und setzen Sie sie erneut ein. Hinweis: Die Batterie befindet sich im unteren Rückenbereich des AmbuMan®. 
AmbuMan® wird im qubeCONTROL angezeigt, beim Verbinden kommt folgende Fehlermeldung: „Dieses Gerät kann nicht mit AmbuMan® verbunden werden. Bitte wenden Sie sich an den Gerätemanager Ihrer Organisation.“	Es ist keine Lizenz auf dem genutzten qubeCONTROL aktiviert. Nach Freigabe der Lizenz von SKILLQUBE muss diese im qubeCONTROL mit qubeCLOUD synchronisiert und somit aktiviert werden.	Synchronisieren Sie qubeCONTROL mit qubeCLOUD, indem Sie auf Ihren Benutzernamen klicken und auf den Button SYNC klicken.  Hinweis: Sollte keine Lizenz vorhanden sein, nehmen Sie bitte Kontakt über support@skillqube.com auf.

Softwareversion AmbuMan®

Hinweis: Wenn Sie die Softwareversion des AmbuMan® benötigen, öffnen Sie einen beliebigen Browser und geben Sie **192.168.1.1/config** in die Adresszeile ein (siehe Abbildung 5). Achtung: Um auf diese Seite zugreifen zu können, muss Ihr AmbuMan® eingeschaltet sein und Ihr Gerät mit dem WLAN **AmbuW** verbunden sein.

Abbildung 5: Website zum Einsehen der AmbuMan® Softwareversion

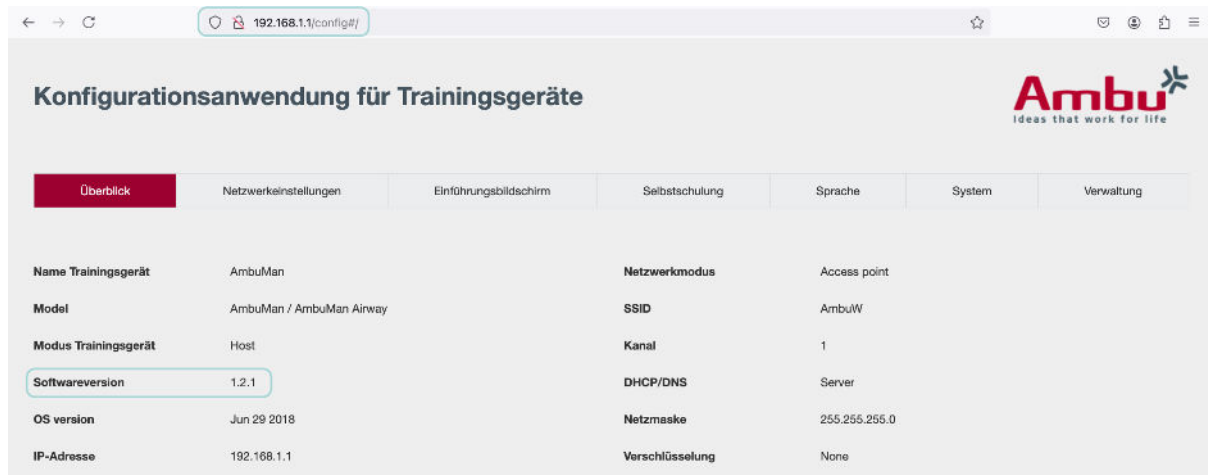

Kontakt

SKILLQUBE GmbH

Hohenaspen 20
69231 Rauenberg
Deutschland

+49 6222 38 62 65
info@skillqube.com
www.skillqube.com

