

Update 6.2.0 qubeSERIE

Release Notes Version 6.2.0

Allgemein

- Stabilitäts- und Performance-Optimierungen
 - **qubeBOX** Update auf Version **1.2.3**
 - Verbesserte Anzeige der Verbindungsqualität
 - Optimierungen in der Beatmungs-Simulation
-

Neue Oberfläche


- **qube3000** - simuliert den Oxylog 3000 plus von Dräger

qube3000




qubeCONTROL

- Realitätsnahe Simulation dank dedizierter Elektroden- und Sensor-Auswahl

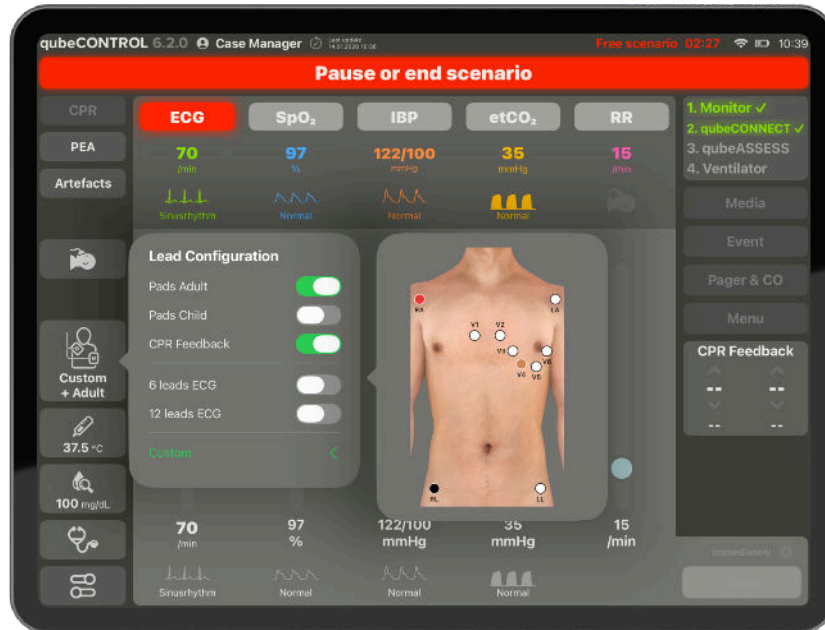


- Vollständig modernisiertes CPR Dashboard mit verbesserter Analyse- und Feedbackfunktion

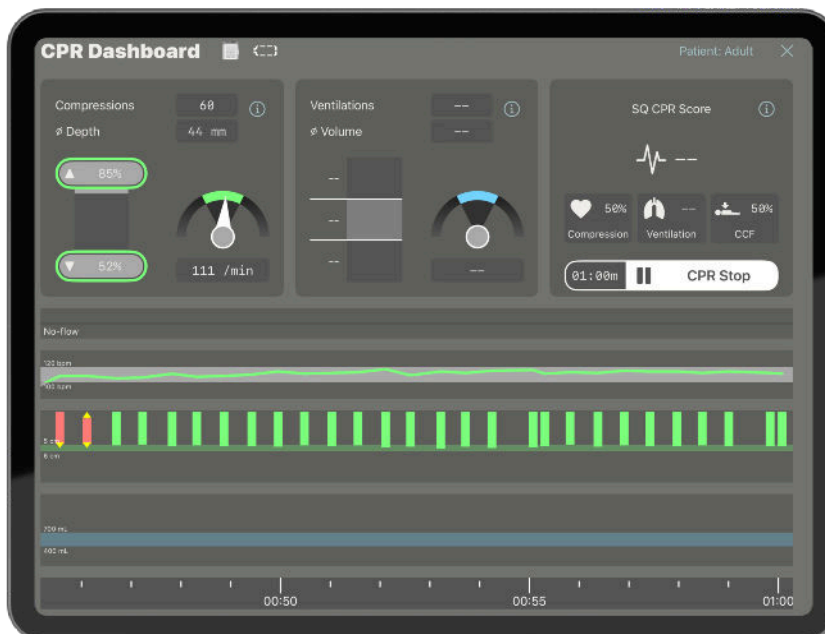

- Aktualisiertes Logbuch
- Neues Benachrichtigungssystem zur Bereitstellung relevanter Status- und Systemhinweise

- Verbindungsanzeige (WLAN oder Peer-to-Peer): Die Verbindungsanzeige zeigt an, ob die Geräte über WLAN oder per Peer-to-Peer direkt miteinander verbunden sind und ob die Verbindung aktiv und stabil besteht.

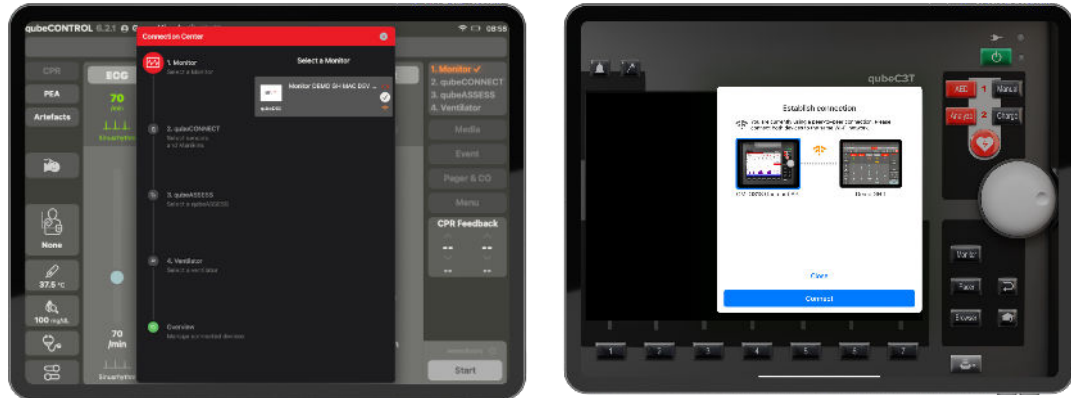

qubeC3 & qubeC3T

- Erweiterte Möglichkeiten im Layout-Editor

qubeAED

- Metronom-Unterstützung während der HLW-Phase

Wichtiger Hinweis

- Bitte achten Sie beim Wechsel auf Version 6.2.0 darauf, das Update auf allen genutzten iPads durchzuführen.
- Mit dem Wechsel ist auch ein Update der **qubeBOX**-Firmware auf Version 1.2.3. notwendig. Hierfür müssen alle Sensoren während des Updates dekonnektiert sind. Eine Anleitung für das Update finden Sie [hier](#).

Kontakt
support@skillqube.com
+49 6222 – 386265
skillqube.com/support